

Hebehilfe für den Notfall – klein, leicht, klappbar und schnell im Einsatz!

Stellen Sie sich eine alltägliche Situation zuhause in der Seniorenwohnung vor. Eine Person ist in der Wohnung unterwegs, stürzt und kann nicht mehr selbstständig aufstehen. Für den Partner oder die zur Hilfe gerufene ambulante Pflege ist es eine fast unlösbare Aufgabe die Person vom Fußboden ohne Hilfsmittel aufzuheben.

Diese mobile Hebehilfe ist leicht (ca. 10,5 kg) und faltbar. Sie lässt sich auch im kleinsten Fahrzeug unterbringen und ist jederzeit sofort sowie überall einsatzbereit. Mit ein paar Handgriffen ist diese Hebehilfe aufgeklappt und an die auf dem Boden liegende Person angelegt. Das Entscheidende dabei: Die benötigte Kraft ist nur ca. ein Viertel des Körpergewichtes der anzuhebenden Person – bei einer Person mit 80 kg lediglich ca. 20 kg.

Durch einfaches Anheben des Hebestuhls an den Griffen bringt man die liegende Person sanft und ohne Schmerzen in die Sitzposition. In dieser Position kann sie nun verweilen, aufstehen oder umgesetzt werden. Einfacher und leichter geht es nicht! Die Bilder zeigen schrittweise das einfache Handhaben der Hebehilfe an die gefallene Person.

Nach dem einfachen, schnellen Zusammenbau kann **die Hebehilfe** ganz einfach an die Person angelegt werden. Durch die Lehnen und das Anpassen der Kopfstütze wird die gefallene Person so angenehm wie möglich aufgehoben. Der integrierte Sicherheitsgurt verhindert ein Verrutschen auf der Sitzfläche. Diese Hebehilfe kann bis 100kg. Körpergewicht angewendet werden.



Nimm's leicht, HELFEN mit System!